

【リハトレナー液晶消毒・清掃について】

平素より、弊社リハトレナーをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、施設内設備清掃・消毒の観点よりリハトレナー液晶消毒についてお問い合わせを頂くことが多くありましたのでご案内致します。

使用するもの

- ・ 消毒用エタノール
- ・ 乾いたやわらかい布

消毒方法

- ・ マシンの電源を落とし、乾いたやわらかい布に消毒用エタノールを吹きかけ、液晶を消毒してください。
- ・ 汚れがひどい場合には、乾いたやわらかい布に中性洗剤を染み込ませ、硬く絞って拭き取ってください。



注意事項

- ・ 拭き取りをする際はやさしく拭いてください。
- ・ 液晶面に直接消毒用エタノールを吹きかけると故障の原因となります。
- ・ 乾いたやわらかい布は湿らせる程度にし、消毒液が滴らないようにしてください。
- ・ 製品内部に水分が入ると故障の原因となります、特に液晶とフレームのフチは注意してください。(下記 写真 赤い部分)



※液晶の不具合や故障は有償にて対応になります。